

## جهاز شريحة الدم

عبارة عن جهاز أخذ عينات مقطعي يستخدم مرة واحدة ، مما يسهل على فنيي المختبر إكمال نوع ما قبل LY جهاز المقطع النقل والإجراءات المتقاطعة مع تقليل مخاطر الانسكابات والكسر.

### **طريقة العمل**

1. وضع الجهاز فوق أنبوب الاختبار مباشرة
2. LY إدخال قطعة الدم في جهاز شريحة
3. الضغط حتى تثقب الإبرة قطعة الدم
4. السماح بتدفق الدم من الجزء إلى أنبوب العينة
5. في حاوية النفايات الطبية LY التخلص من شريحة الدم وجهاز

### **انتباه**

- 1 LY segmen قم بارتداء القفازات عند استخدام جهاز
- 2 لا تضغط حتى تخترق الإبرة القطعة
- 3 تستخدم مرة واحدة فقط
- 4 لغرض التشخيص في المختبر

### **مزايا**

1. الوصول إلى الدم من قطعة بأمان.
2. تجنب خطر حدوث إصابات حادة أو تناثر.
3. تقليل احتمالية تلوث عينات الدم



CE



FDA

[www.chinalyxr.com](http://www.chinalyxr.com)

