

جهاز الجزء الدم

الجهاز القطاع هو واحدة في استخدام جهاز أخذ العينات شريحة يجعل من السهل للفنيين مختبر لاستكمال نوع ما قبل نقل LY الدم والإجراءات عبر مع التقليل من خطر تسرب والكسر.

طريقة العمل

1. وضع الجهاز مباشرة على الجزء العلوي من أنبوب الاختبار.
2. LY إدراج شريحة الدم في الجهاز شريحة.
3. الضغط حتى ثقب الإبرة قطاع الدم.
4. السماح تدفق الدم من جزء في أنبوب العينة.
5. في حاوية النفايات الطبية LY التخلص من جزء الدم وجهاز شريحة.

انتباه

1. جهاز LY ارتداء القفازات عند استخدام.
2. لا تضغط حتى الإبرة قد اخترقت هذا الجزء.
3. تستخدم مرة واحدة فقط.
4. لالمختبر في الأغراض التشخيصية.

مزايا

1. الدم الوصول من شريحة بأمان.
2. خطر تجنب الإصابات الحادة أو بقع.
3. تقليل احتمال التلوث عبر عينة من الدم.



CE



FDA

www.chinalyxr.com

