

جهاز مختبر جهاز قطاع الدم

هو جهاز أخذ عينات من قطعة واحدة يستخدم من السهل بالنسبة للفنيين المختبرين إكمال نوع ما قبل نقل LY جهاز القطعة وإجراءات الصليب مع تقليل خطر الانسكابات والكسر.

طريقة العمل

1. وضع الجهاز مباشرة أعلى أنبوب الاختبار.
2. LY إدراج قطاع الدم إلى جهاز شريحة.
3. الضغط حتى تثقب إبرة قطاع الدم.
4. السماح بتدفق الدم من القطاع إلى أنبوب العينة.
5. تخلص من شريحة الدم ولي جهاز القطاع في حاوية النفايات الطبية.

الانتباه

1. وبعد [Segmen أجهزة الدم](#) Lob Lob ارتداء قفازات عند استخدام.
2. لا تضغط حتى اخترقت الإبرة الجزء.
3. واحد الاستخدام فقط.
4. للغرض في المختبر التشخيصي.

مزايا

1. الوصول إلى الدم من قطعة بأمان.
2. تجنب خطر الإصابات الحادة أو الرش.
3. تقليل إمكانات التلوث عبر عينة الدم.



CE



FDA

www.chinalyxr.com

00000000 000000 0000 00000000 0000 000 0000 000000 000 0000 0 0000 0000 0000 00000000 0000 :00000000 00000000
 00000000 00000000