

طبي جهاز قطاع الدم

هو جهاز أخذ العينات من خلال استخدام الفنيين المعملين لإكمال نوع ما قبل نقل وإجراءات الصليب مع LY جهاز جزء تقليل خطر الانسكابات والكسر.

طريقة العمل

1. وضع الجهاز مباشرة أعلى أنبوب الاختبار.
2. LY إدراج قطاع الدم إلى جهاز شريحة.
3. الضغط حتى تنقب إبرة قطاع الدم.
4. ترك الدم يتدفق من القطاع إلى أنبوب العينة.
5. التخلص من قطاع الدم ولي جهاز القطاع في حاوية النفايات الطبية.

انتباه

1. Ly Segmen ارتداء قفازات عند استخدام جهاز.
2. لا تضغط حتى اخترقت الإبرة القطعة.
3. واحد الاستخدام فقط.
4. للغرض في المختبر التشخيصي.

مزايا

1. الوصول إلى الدم من قطعة بأمان.
2. تجنب خطر الإصابات الحادة أو الرش.
3. تقليل إمكانات التلوث عبر عينة الدم.

