

Blutsegmentgerät

Das LY-Segmentgerät ist ein Einweg-Segmentprobenahmegerät, mit dem Labortechniker auf einfache Weise Vor-Transfusions- und Kreuzverfahren durchführen und gleichzeitig das Risiko von Verschüttungen und Brüchen minimieren können.

Arbeitsmethode

- 1 Stellen Sie das Gerät direkt auf das Reagenzglas.
- 2 Einsetzen des Blutsegments in das LY-Segmentgerät.
- 3 Drücken, bis die Nadel das Blutsegment durchstößt.
- 4 Blut aus dem Segment in das Probenröhrchen fließen lassen.
- 5 Entsorgen des Blutsegments und des LY-Segments in einem medizinischen Abfallbehälter.

Beachtung

- 1 Tragen Sie Handschuhe, wenn Sie das LY Segment-Gerät verwenden.
- 2 Drücken Sie nicht, bis die Nadel das Segment durchbohrt hat.
- 3 Nur zur einmaligen Verwendung.
- 4 Für In-vitro-Diagnostikzwecke.

Vorteile

1. Greifen Sie sicher auf Blut aus einem Segment zu.
2. Vermeiden Sie scharfe Verletzungen oder Spritzer.
3. Reduzieren Sie das Potenzial einer Kreuzkontamination der Blutprobe.



CE



FDA

www.chinalyxr.com

