

## Blut-Segment-Gerät

LY-Segment-Gerät ist ein Einweg-Segment Probenahmevorrichtung für Labortechniker leicht macht Pre-Transfusionstyp zu vervollständigen und Querverfahren, während das Risiko von Leckagen und Bruch zu minimieren.

### Arbeitsweise

- 1 Platzieren der Vorrichtung direkt oben auf dem Teströhrchen.
- 2 Einsetzen des Blutsegments in LY-Segment-Gerät.
- 3 Drücken, bis die Nadel das Blut Segment durchbohrt.
- 4 Lassen das Blut aus dem Segment in das Probenröhrchen.
- 5 Wegwerfen das Blut Segment und LY Segment Gerät in die medizinische Abfallbehälter.

### Aufmerksamkeit

- 1 Handschuhe tragen, wenn LY segmen Gerät.
- 2 Sie drücken nicht, bis die Nadel das Segment durchbohrt hat.
- 3 Einmalgebrauch nur.
- 4 Für in-vitro-diagnostische Zwecke.

### Vorteile

1. Rufen Sie Blut aus einem sicheren Bereich.
2. Vermeiden Sie Risiko von scharfen Verletzungen oder Splatter.
3. Reduzieren Potenzial der Blutprobe Kreuzkontamination.



CE



FDA

[www.chinalyxr.com](http://www.chinalyxr.com)

