

LaborgerätBlutsegmentgerät

Das Segmentgerät ist ein Segment-Segment-Segment-Abtastgerät, das Labor-Techniker leicht macht, um Vorransfusionstypen und Kreuzverfahren abzuschließen, während das Risiko von Verschüttungen und Bruchgefahren minimiert wird.

Arbeitsmethode

1. Platzieren Sie das Gerät direkt auf das Reagenzglas.
2. Einsetzen des Blutsegments in das Segmentgerät von LY.
- 3 Drücken, bis die Nadel das Blutsegment punktiert.
4. Blut von dem Segment in die Probenröhre fließen lassen.
5. Verwerfen des Blutsegments und des LY-Segmentgeräts in den medizinischen Abfallbehälter.

Aufmerksamkeit

1. Tragen Sie Handschuhe, wenn Sie LY LOB verwenden Blutsegmen-Gerät.
2. Drücken Sie nicht, bis die Nadel das Segment durchbohrt hat.
- 3 Nur zur einmaligen Verwendung.
4. Für In-vitro-Diagnostikzwecke.

Vorteile

1. Zugriff auf Blut aus einem Segment sicher.
2. Vermeiden Sie die Gefahr von scharfen Verletzungen oder Splatter.
3. Reduzieren Sie das Potenzial der Blutprobequerkontamination.



CE



FDA

www.chinalyxr.com



Schlüsselwörter: Laborgerät, [Blutsegmentgerät](#), Alternative Hämatypsegment, Einweg-Blutsegmentgerät, Segmentgerät für medizinische USA