

MedizinischBlutsegmentgerät

Das Segmentgerät ist ein Segment-Segment-Segment-Abtastgerät, das die Labor-Techniker leicht macht, um Vorransfusionstypen und Querverfahren abzuschließen, während das Risiko von Verschüttungen und Bruchgefahren minimiert wird.

Arbeitsmethode

1. Platzieren Sie das Gerät direkt auf das Reagenzglas.
2. Einsetzen des Blutsegments in das Segmentgerät von LY.
- 3 Drücken, bis die Nadel das Blutsegment punktiert.
4. Blut fließen von dem Segment in das Probenröhrchen.
Verwerfen des Blutsegments und des LY-Segmentgeräts in den medizinischen Abfallbehälter.

Aufmerksamkeit

1. Tragen Sie Handschuhe bei der Verwendung von Ly Segmen-Gerät.
2. Drücken Sie nicht, bis die Nadel das Segment durchbohrt hat.
- 3 Nur zur einmaligen Verwendung.
4. Für In-vitro-Diagnostikzwecke.

Vorteile

1. Zugriff auf Blut aus einem Segment sicher.
2. Vermeiden Sie das Risiko scharfer Verletzungen oder Splatter.
3. Reduzieren Sie das Potenzial der Blutprobe-Kreuzkontamination.

