

Lanyuan [Blood Dispenser](#): ein Einzelteil entworfen, um die Notwendigkeit zu beseitigen, die Stopper eines Rohres von Blut zu entfernen, wenn ein Flecken.

Bild

Using-Methode

- 1 halten Sie die Röhre aufrecht, stecken Sie den Lanyuan in den Deckel des Rohres.
- 2 invertieren Sie das Rohr auf einen Objektträger oder einen anderen Rezeptor.
- 3 Drücken Sie den Kopf des Lanyuan Blutes dispenser in das Glas schieben, um einen Tropfen Blut zu produzieren.
- 4 Entfernen Sie das Rohr und werfen Sie die Lanyuan des Blutes oder das gesamte Rohr.

Vorteil

Ly Blood Dispenser ist ein sicheres und effektives Werkzeug im Labor.

- 1 ein schnelleres Blut Dispensing-Methode als die Nadeln und Schläuche.
- 2 ein einfacher Weg, um konsequent Größe Blut sinkt.
- 3 ein klarer Weg, um die Durchblutung zu zeigen.
- 4 eine Alternative zur Beseitigung der Deckel der Röhre für jede Sammlung.

