

## **Dispositivo de segmento sanguíneo**

El dispositivo de segmento LY es un dispositivo de muestreo de segmento de un solo uso que facilita a los técnicos de laboratorio completar el tipo de pretransfusión y los procedimientos cruzados mientras minimiza el riesgo de derrames y roturas.

### **Método de trabajo**

- 1 Colocando el dispositivo directamente encima del tubo de ensayo.
- 2 Inserción del segmento sanguíneo en el dispositivo de segmento LY.
- 3 Presionando hasta que la aguja pinche el segmento sanguíneo.
- 4 Dejar que la sangre fluya desde el segmento al interior del tubo de muestra.
- 5 Desechar el segmento sanguíneo y el dispositivo del segmento LY en un contenedor de desechos médicos.

### **Atención**

- 1 Use guantes cuando use el dispositivo LY segmen.
- 2 No apriete hasta que la aguja haya perforado el segmento.
- 3 De un solo uso.
- 4 Para fines de diagnóstico in vitro.

### **Ventajas**

1. Acceda a la sangre de un segmento de forma segura.
2. Evite el riesgo de lesiones cortantes o salpicaduras.
3. Reducir el potencial de contaminación cruzada de las muestras de sangre.



CE



FDA

[www.chinalyxr.com](http://www.chinalyxr.com)

