

Dispositivo segmento arterial

LY dispositivo segmento es un segmento de dispositivo de muestreo de un solo uso hace que sea fácil para los técnicos de laboratorio para completar el tipo de pre-transfusión y procedimientos transversales y reducir al mínimo el riesgo de derrames y roturas.

Método de trabajo

- 1 La colocación del dispositivo directamente en la parte superior del tubo de ensayo.
- 2 Insertar el segmento de la sangre en el dispositivo segmento LY.
- 3 Al presionar hasta que la aguja perfora el segmento de sangre.
- 4 Dejar que el flujo de sangre desde el segmento en el tubo de muestra.
- 5 Descartando el segmento arterial y el dispositivo segmento LY en un contenedor de desechos médicos.

Atención

- 1 Use guantes cuando se utiliza LY dispositivo Segmen.
- 2 No apriete hasta que la aguja ha perforado el segmento.
- 3 De un solo uso.
- 4 Para vitro en usos de diagnóstico.

ventajas

1. El acceso de sangre de un segmento de forma segura.
2. Evitar el riesgo de lesiones agudas y contra las salpicaduras.
3. Reducir el potencial de contaminación cruzada de muestras de sangre.



CE



FDA

www.chinalyxr.com

