

## Dispositivo de laboratorio [Dispositivo de segmento sanguíneo](#)

El dispositivo de segmento LY es un dispositivo de muestreo de segmento de un solo uso, facilita que los técnicos de laboratorio completen el tipo de pre-transfusión y los procedimientos cruzados al tiempo que minimicen el riesgo de derrames y roturas.

### Método de trabajo

- 1 Colocando el dispositivo directamente en la parte superior del tubo de ensayo.
- 2 Insertar el segmento de sangre en el dispositivo de segmento LY.
- 3 Presionando hasta que la aguja pinche el segmento de sangre.
- 4 Dejar que fluya el flujo de sangre desde el segmento al tubo del espécimen.
- 5 Deseche el segmento sanguíneo y el dispositivo de segmento LY en un recipiente de desechos médicos.

### Atención

- 1 Use guantes cuando use LY LOB [Dispositivo de Sangre Segmen](#).
- 2 No se apriete hasta que la aguja haya perforado el segmento.
- 3 De un solo uso.
- 4 Para fines de diagnóstico in vitro.

### Ventajas

1. Acceda a la sangre de un segmento de manera segura.
2. Evite el riesgo de lesiones agudas o salpicaduras.
3. Reducir el potencial de la contaminación cruzada de la muestra de sangre.



CE



FDA

[www.chinalyxr.com](http://www.chinalyxr.com)



Palabras clave: Dispositivo de laboratorio, [Dispositivo de segmento sanguíneo](#), Alternativa de segmento de hematipo, dispositivo de segmento de sangre desechable, dispositivo de segmento para Medical USA