

## **Médico** Dispositivo de segmento sanguíneo

El dispositivo de segmento LY es un dispositivo de muestreo de segmentos de un solo uso, facilita que los técnicos de laboratorio completen el tipo de pre-transfusión y los procedimientos cruzados al tiempo que minimicen el riesgo de derrames y roturas.

### **Método de trabajo**

- 1 Colocando el dispositivo directamente en la parte superior del tubo de ensayo.
- 2 Insertar el segmento de sangre en el dispositivo de segmento LY.
- 3 Presionando hasta que la aguja pinche el segmento sanguíneo.
- 4 Dejar fluir el flujo de sangre desde el segmento al tubo del espécimen.  
Deseche el segmento sanguíneo y el dispositivo de
- 5 segmento LY en un recipiente de desechos médicos.

### **Atención**

- 1 Use guantes al usar el dispositivo LY SEGMEN.
- 2 No se apriete hasta que la aguja haya perforado el segmento.
- 3 De un solo uso.
- 4 Para fines de diagnóstico in vitro.

### **Ventajas**

1. Acceda a la sangre de un segmento de manera segura.
2. Evite el riesgo de lesiones agudas o salpicaduras.
3. Reducir el potencial de la contaminación cruzada de la muestra de sangre.

