

# Yeso de París vendaje para piernas y brazos fracturas óseas fijo

## 1.Material:

gasa de algodón y [yeso blanco](#)

## 2.Specifications:

anchura del vendaje de 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 12,5 cm, 15 cm, 20 cm.

2,7 m de longitud normal, o cualquier longitud según la petición de los clientes.

<b>Especificación</b>	<b>Paquete (rollos / caja)</b>
5x270cm	240
7.5x270cm	240
10x270cm	120
12.5x270cm	120
15x270cm	120
20x270cm	60

## 3.Features:

- ^ Menor pérdida de polvo de yeso al empapar por el agua.
- ^ Tiempo solidar estable.
- ^ Fácil de secar.
- ^ Super fuerza.
- ^ Fácil de operar, favorable al medio ambiente.

## 4.Usage:

Adecuado para la operación de cirugía ósea, yeso orthoreadic, máscara, artesanías y artes, juguetes, material deportivo saludable para la figura delgada y así sucesivamente.

## 5.Attention:

- ^ Remojar el rollo de vendaje a fondo y exprimir el agua fuera del agua. No apriete en el agua para evitar la pérdida de polvo de yeso.
- ^ Prestar atención a la uniformidad cuando amarre. rollo de vendaje rueda sobre el cuerpo,

con el lado flojo toca músculos. No atar adentro hacia afuera, y no arrancarla de la banda para evitar que la prensa cadena de corona circular.

^Deshacerse de las burbujas entre cada capas mediante el tacto hasta la total uniformidad, pero después de que el yeso líquido se convierte en pasta (punto de solidificación de yeso), no se debe apretar para evitar la ruptura de un sólido y estructura cado del yeso.



Lavanda

Email: [sales1@lanyuansupply.com](mailto:sales1@lanyuansupply.com)

Tel: 0086-13657299068