

Dispositif de segment de sang

Le dispositif de segment LY est un dispositif d'échantillonnage de segment à usage unique qui permet aux techniciens de laboratoire d'effectuer facilement des procédures de type pré-transfusionnel et croisées tout en minimisant le risque de déversements et de bris.

Méthode de travail

- 1 Placer l'appareil directement au-dessus du tube à essai.
- 2 Insertion du segment sanguin dans le dispositif de segment LY.
- 3 Appuyer jusqu'à ce que l'aiguille perce le segment sanguin.
- 4 Laisser le sang s'écouler du segment dans le tube à échantillon.
- 5 Jeter le segment sanguin et le dispositif de segment LY dans un conteneur de déchets médicaux.

Attention

- 1 Portez des gants lors de l'utilisation de l'appareil LY segmen.
- 2 Ne serrez pas tant que l'aiguille n'a pas percé le segment.
- 3 Usage unique.
- 4 À des fins de diagnostic in vitro.

Avantages

1. Accédez au sang d'un segment en toute sécurité.
2. Évitez les risques de blessures ou d'éclaboussures.
3. Réduisez le potentiel de contamination croisée des échantillons sanguins.



CE



FDA

www.chinalyxr.com

