

Segment de sang périphérique

dispositif de segment LY est un dispositif d'échantillonnage de segment à usage unique, il est facile pour les techniciens de laboratoire pour compléter le type pré-transfusion et les procédures transversales tout en minimisant les risques de déversements et les bris.

méthode de travail

- 1 Plaçant le dispositif directement sur la partie supérieure du tube d'essai.
- 2 Insertion du segment de sang dans le dispositif de segment LY.
- 3 Une pression jusqu'à ce que l'aiguille perce le segment de sang.
- 4 Laisser le flux sanguin à partir du segment dans le tube d'échantillon.
- 5 Rejeter le segment de sang et un dispositif de segment LY dans un conteneur de déchets médicaux.

Attention

- 1 Portez des gants lorsque vous utilisez LY dispositif segmentaire.
- 2 Ne pas presser jusqu'à ce que l'aiguille a percé le segment.
- 3 Usage unique.
- 4 À des fins de diagnostic in vitro.

Avantages

1. L'accès du sang d'un segment en toute sécurité.
2. Éviter les risques de blessures ou d'éclaboussure tranchants.
3. Réduire les risques de contamination croisée des échantillons de sang.



CE



FDA

www.chinalyxr.com

