

Lanyuan [outil de frottis de sang](#): un article conçu pour éliminer la nécessité d'enlever le bouchon d'un tube de sang lors de la fabrication d'un frottis.

Image

Using, méthode

- 1 en tenant le tube droit, insérez la canule du distributeur de sang Lanyuan dans le couvercle du tube.
- 2 inversez le tube sur une glissière de verre ou un autre récepteur.
- 3 Appuyez sur la tête de Lanyuan Blood dispenser dans la glissière de verre pour produire une goutte de sang.
- 4 Enlevez le tube et jetez le composant du distributeur de sang Lanyuan ou le tube entier.

Avantage

L'outil de frottis de sang de ly est un outil sûr et efficace dans le laboratoire.

- 1 une méthode de dosage du sang plus rapide que les bâtonnets applicateurs et les tubes capillaires.
- 2 une manière simple d'obtenir les gouttes de sang uniformément de taille.
- 3 une manière claire de montrer le flux sanguin.
- 4 une alternative pour enlever le couvercle d'un tube pour chaque collection.



www.lanyuansupply.com