

## Segment de sang périphérique

dispositif de segment LY est un dispositif d'échantillonnage de segment à usage unique, il est facile pour les techniciens de laboratoire pour compléter le type pré-transfusion et les procédures transversales tout en minimisant les risques de déversements et les bris.

### méthode de travail

- 1 Plaçant le dispositif directement sur la partie supérieure du tube d'essai.
- 2 Insertion du segment de sang dans le dispositif de segment LY.
- 3 Une pression jusqu'à ce que l'aiguille perce le segment de sang.
- 4 Laisser le flux sanguin à partir du segment dans le tube d'échantillon.
- 5 Rejeter le segment de sang et un dispositif de segment LY dans un conteneur de déchets médicaux.

### Attention

- 1 Portez des gants lorsque vous utilisez LY dispositif segmentaire.
- 2 Ne pas presser jusqu'à ce que l'aiguille a percé le segment.
- 3 Usage unique.
- 4 À des fins de diagnostic in vitro.

### Avantages

1. L'accès du sang d'un segment en toute sécurité.
2. Éviter les risques de blessures ou d'éclaboussure tranchants.
3. Réduire les risques de contamination croisée des échantillons de sang.

