

Appareil de laboratoire[Dispositif de segment de sang](#)

Le périphérique de segment LY est un dispositif d'échantillonnage de segment à usage unique permet de remplir facilement les techniciens de laboratoire de compléter le type de pré-transfusion et des procédures transversales tout en minimisant le risque de déversement et de rupture.

Méthode de travail

- 1 Placer l'appareil directement sur le tube à essai.
- 2 Insertion du segment de sang dans le dispositif de segment Ly.
- 3 Appuyez sur jusqu'à ce que l'aiguille perfectionne le segment sanguin.
- 4 Laisser débiter du sang du segment dans le tube de spécimen.
- 5 Jeter le segment de sang et le dispositif de segment de sang dans un conteneur de déchets médicaux.

Attention

- 1 Porter des gants lors de l'utilisation de Ly Lob[Dispositif de segmenté de sang](#).
- 2 Ne pas pressez que l'aiguille a percé le segment.
- 3 Usage unique.
- 4 Pour but diagnostique in vitro.

Avantages

1. Accédez au sang d'un segment en toute sécurité.
2. Évitez les risques de blessures aiguës ou d'éclaboussures.
3. Réduire le potentiel de la contamination croisée des échantillons de sang.



CE



FDA

www.chinalyxr.com



Mots clés: Dispositif de laboratoire, [Dispositif de segment de sang](#), Dispositif de segment de sang jetable de l'hématype, dispositif de segment de segment de segment pour les États-Unis médicaux