

## **Médical** Dispositif de segment de sang

Le périphérique de segment LY est un dispositif d'échantillonnage de segment à usage unique qui permet de remplir facilement les techniciens de laboratoire de remplissage de type pré-transfusion et des procédures transversales tout en minimisant le risque de déversement et de rupture.

### **Méthode de travail**

- 1 Placer le dispositif directement sur le dessus du tube à essai.
- 2 Insérer le segment de sang dans le dispositif de segment Ly.
- 3 En appuyant jusqu'à ce que l'aiguille perce le segment sanguin.
- 4 Laisser débiter du sang du segment dans le tube de spécimen.  
Jeter le segment de sang et le dispositif de
- 5 segment de sang dans un conteneur de déchets médicaux.

### **Attention**

- 1 Portez des gants lors de l'utilisation du périphérique LY Segmen.
- 2 Ne sortez pas avant que l'aiguille ait percé le segment.
- 3 Usage unique.
- 4 Pour but diagnostique in vitro.

### **Avantages**

1. Accédez au sang d'un segment en toute sécurité.
2. Évitez les risques de blessures aiguës ou d'éclaboussures.
3. Réduire le potentiel de la contamination croisée des échantillons de sang.

