

Orthopédique Le plâtre de Paris Bandage (POP Bandage)

1.Material:

gaze de coton et de plâtre de Paris

2.Specifications:

largeur de Bandage 5cm, 7.5cm, 10cm, 12.5cm, 15cm, 20cm.

Normale 2.7m de longueur, ou de toute longueur en fonction de la demande des clients.

spécification	Package (rouleaux / ctn)
5x270cm	240
7.5x270cm	240
10x270cm	120
12.5x270cm	120
15x270cm	120
20x270cm	60

3.Features:

- ^ Moins la perte de poudre de gypse quand trempage en eau.
- ^ Temps consolida- stable.
- ^ Facile à sécher.
- ^ Super force.
- ^ Facile à utiliser, respectueux de l'environnement.

4.Usage:

Convient pour un fonctionnement de la chirurgie osseuse, le gypse orthoreadic, masque, artisanat et arts main, jouets, matériel de sport sain pour silhouette mince et ainsi de suite.

5.Attention:

- ^ Faire tremper le rouleau de bandage à fond et presser l'eau à l'extérieur de l'eau. Ne pas presser dans l'eau pour éviter la perte de poudre de gypse.
- ^ Faites attention à la planéité lorsque cravate vers le haut. rouleau de Bandage roule sur le

corps, avec le côté lâche touche muscles. Ne pas attacher à l'envers, et non pas le déchirer par la bande pour empêcher l'anneau de presse de la chaîne.

^Débarrassez-vous des bulles entre toutes les couches par le toucher jusqu'au complet planéité, mais après le gypse liquide devient pâte (point de gypse solidification), il ne faut pas le presser pour éviter la rupture du solide de la structure fiée du gypse.



Lavande

Email: sales1@lanyuansupply.com

Tel: 0086-13657299068