

Plâtre de Bandage de Paris Pour les bras et les jambes fractures osseuses fixées

1.Material:

gaze de coton et [plâtre de Paris](#)

2.Pécifications:

Largeur du bandage 5cm, 7,5 cm, 10cm, 12.5cm, 15cm, 20cm.

Longueur normale de 2,7 m ou toute longueur selon la demande des clients.

spécification	Paquet (rouleaux / ctn)
5x270cm	240
7.5x270cm	240
10x270cm	120
12.5x270cm	120
15x270cm	120
20x270cm	60

3.Autures:

^ moins la perte de poudre de gypse lorsque vous trempez par de l'eau.

^ Temps solide stable.

^ Facile à sécher.

^ Super force.

^ Facile à utiliser, respectueux de l'environnement.

4.Unage:

Convient au fonctionnement de la chirurgie osseuse, de gypse orthopédique, de masque, d'artisanat à la main et d'arts, de jouets, de matériaux de sport sains pour la silhouette mince et ainsi de suite.



5. Servation:

- ^ Faire tremper complètement le rouleau du bandage et presser de l'eau à l'extérieur de l'eau. Ne le pressez pas dans l'eau pour éviter la perte de poudre de gypse.
- ^ Faites attention à la vie même lorsque vous attachez. Le rouleau de bandage roule sur le corps, avec des muscles touchés par latéralement lâche. Ne vous attachez pas à l'envers, et ne pas la déchirer par bande pour prévenir la presse à la chaîne d'annulus.
- ^ Débarrassez-vous des bulles entre toutes les couches par toucher jusqu'à ce que le liquide de gypse devienne pâte (point de consolidation de gypse), vous ne devez pas la presser pour éviter la rupture de solide structure fiée du gypse.





