

Lanyuan [distributeur de sang](#): un élément visant à éliminer le besoin d'enlever le bouchon d'un tube de sang lors d'un frottis.

Image

À l'aide de la méthode

- 1 en maintenant le tube vertical, monter la canule de distributeur pour le sang Lanyuan dans le couvercle du tube.
- 2 il faut inverser le tube sur une lame de verre ou autres récepteurs.
- 3 Appuyez sur la tête de Lanyuan sang dispenser dans la lame de verre pour produire une goutte de sang.
- 4 Retirez le tube et jetez Lanyuan du composant sanguin du distributeur ou l'ensemble tube.

Avantage

Distributeur de sang LY est un outil sûr et efficace dans le laboratoire.

- 1 un sang plus rapide distribution de méthode que l'applicateur bâtons et tubes capillaires.
- 2 un moyen simple d'obtenir constamment taille des gouttes de sang.
- 3 un moyen clair de voir la circulation sanguine.
- 4 une alternative à retirer le couvercle du tube, un pour chaque collection.

