

Устройство сегмента крови

Сегментное устройство LY - это одноразовое сегментное устройство для отбора проб, которое позволяет лаборантам легко выполнять процедуры перед переливанием и перекрестные процедуры, сводя к минимуму риск разливов и поломок.

Метод работы

- 1 Размещение устройства непосредственно на пробирке.
- 2 Вставка сегмента крови в устройство сегмента LY.
- 3 Нажимать до прокола иглой сегмента крови.
- 4 Обеспечение кровотока из сегмента в пробирку с образцом.
- 5 Выбрасывание сегмента крови и устройства сегмента LY в контейнер для медицинских отходов.

Внимание

- 1 Используйте перчатки при использовании устройства LY segmen.
- 2 Не сжимайте, пока игла не проткнет сегмент.
- 3 Только для одноразового использования.
- 4 Для диагностики in vitro.

Преимущества

1. Безопасный доступ к крови из сегмента.
2. Избегайте риска получения острых травм или разбрызгивания.
3. Уменьшите вероятность перекрестного загрязнения образцов крови.



CE



FDA

www.chinalyxr.com

