

Сегмент крови Устройство

Устройство сегмент LY является одноразовым устройством для взятия проб сегмента, делает его легким для техников лаборатории, чтобы закончить тип предварительного переливания крови и перекрестных процедур при одновременной минимизации риска разливов и поломки.

способ работы

- 1 Размещение устройства непосредственно на верхней части пробирки.
- 2 Вставка сегмента крови в устройство сегмента LY.
- 3 Нажатие кнопки, пока игла не прокалывает сегмент крови.
- 4 Позволить поток крови из сегмента в образец трубки.
- 5 Отбрасывая сегмент крови и устройство сегмента LY в контейнер медицинских отходов.

Внимание

- 1 Надевайте перчатки при использовании LY Segmen устройства.
- 2 Не сжимайте до тех пор, пока игла не проколола сегмент.
- 3 Одноразовый только.
- 4 Для экстракорпоральной диагностической целью.

преимущества

1. Доступ к крови из сегмента безопасно.
2. Избегайте риска острых травм или плескаться.
3. Снизить потенциал перекрестного загрязнения образцов крови.



CE



FDA

www.chinalyxr.com

