

Ланюан [анализ крови](#): элемент, предназначенный для устранения необходимости снять заглушку трубки крови при взятии мазка.

Изображения


Использование метода

- 1, держа вертикальную трубку, вставьте ланюан кровеносный дозатор, каннула в крышку трубки.
2. перевернуть трубу на стеклянный слайд или другой рецептор.
3. Нажимайте на голову ланюан кровью диспенер на стеклянный слайд, чтобы произвести каплю крови.
4. Удалите трубку и отказаться от ланюан-дозатора крови или всей трубки.

Преимущества

В лаборатории есть надежный и эффективный инструмент для анализа крови.

- 1 более оперативный метод отсчета крови, чем у него и капиллярные трубки.
- 2 простой способ последовательного падения кровяных капель.
- 3 четкий способ показать кровоток.
4. альтернатива удалению крышки трубки для каждой коллекции.

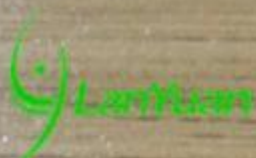

www.lanyuansupply.com