

Лабораторное устройство [Устройство сегмента крови](#)

Устройство сегмента LY представляет собой однократное сегментное оборудование для отбора проб, позволяет легко для техников лаборатории заполнять тип председателя и пересеченные процедуры при минимизации риска разлива и поломки.

Метод работы

1. Размещение устройства непосредственно на верхнюю часть пробирки.
2. Вставка сегмента крови в Ly сегмент устройства.
3. Нажатие до прокола иглы сегмента крови.
4. Отпустить кровоток из сегмента в образную трубку.
5. Отказ от сегмента крови и сегмента LY в контейнер для медицинских отходов.

Внимание

1. Носите перчатки при использовании LOB
[LOB Устройство сегментов крови](#)Отказ
2. Не выжимайте, пока иглы не пронзит сегмент.
3. Одно использованное только.
4. Для диагностической цели in vitro.

Преимущества

1. Безопасное доступа к крови из сегмента.
2. Избегайте риска острых травм или брызги.
3. Уменьшить потенциал кроссового загрязнения образца крови.



CE



FDA

www.chinalyxr.com



Ключевые слова: лабораторное устройство, [Устройство сегмента крови](#), Сегмент гематитса
альтернативное, одноразовое устройство сегмента крови, сегментное устройство для медицинских США