

Медицинский Устройство сегмента крови

Устройство сегмента LY представляет собой однократное сегментное устройство для отбора проб, позволяет легко для техников лаборатории завершить тип преподобных и перекрестных процедур при минимизации риска разлива и поломки.

Метод работы

1. Размещение устройства непосредственно сверху пробирку.
2. Вставляя сегмент крови в устройство сегмента LY.
3. Нажатие до прокола иглы сегмента крови.
4. Отпустить кровоток из сегмента в образную трубку.
5. Отказ от сегмента крови и сегмента LY в контейнер для медицинских отходов.

Внимание

1. Носите перчатки при использовании устройства LY Segmen.
2. Не выжимайте, пока иглы не пронзит сегмент.
3. Одно использованное только.
4. Для диагностической цели in vitro.

Преимущества

1. Безопасное доступа к крови из сегмента.
2. Избегайте риска острых травм или брызги.
3. Уменьшить потенциал перекрестного загрязнения образца крови.

